

¡Importantes informaciones para el empleo por parte del usuario! ¡Rogamos leer su lectura antes de utilizar el instrumento!



¡Advertencias generales!

El manejo y cuidado incorrecto de los instrumentos, la utilización para propósitos ajenos a su finalidad prevista, así como las modificaciones en los instrumentos pueden contribuir a provocar daños en los mismos o bien a su inutilización, lo que asimismo podría causar graves lesiones al paciente o incluso su muerte.

Al recibir el instrumento, controle la eventual presencia de daños derivados del transporte y su funcionamiento perfecto.

Los instrumentos no se suministran esterilizados. El usuario deberá limpiarlos y esterilizarlos antes de su uso. Están exceptuados los productos con la identificación "estéril".



Control de seguridad

Manipule siempre todos los instrumentos con el cuidado necesario. Todo instrumento deberá someterse a un control visual antes de cada uso. Ante todo deberá prestarse especial atención a fisuras, fracturas, flexiones, dificultad de movimiento - particularmente en zonas como filos, puntas, cierres, bloqueos, enclavamientos y todas las partes móviles. Cuando el instrumento ha sido desmontado, deberá controlarse el funcionamiento impecable y el firme apriete de todos los tornillos y componentes una vez montado el mismo.



Limpieza, cuidados y esterilización

Inmediatamente después de su uso los instrumentos deberán limpiarse a fondo y desinfectarse. Preste especial atención a las zonas de acceso difícil como filos, puntas, cierres, bloqueos y enclavamientos. Los productos desmontables deberán limpiarse siempre desmontados. Únicamente deberán utilizarse productos de limpieza aprobados para instrumentos quirúrgicos. Observe las instrucciones del fabricante referentes a la concentración y el tiempo de actuación de los productos desinfectantes. No sobrepasar los valores indicados, para evitar daños en los instrumentos.

El último aclarado deberá realizarse enjuagando a fondo con agua desmineralizada. A continuación, se dejan escurrir bien los instrumentos y se secan.

Todos los instrumentos deberán lubricarse con un aceite adecuado y fisiológicamente inocuo después de cada limpieza y antes de su esterilización.

Todos los instrumentos con articulaciones deberán esterilizarse abiertos. Recomendamos utilizar el autoclave o el esterilizador de aire caliente como métodos de esterilización. Por favor, observe las instrucciones de uso del fabricante.

Después de la esterilización todos los instrumentos deberán dejarse enfriar a temperatura ambiente sin refrigeración adicional. ¡No enfriar los instrumentos con agua fría!



Manipulación y almacenamiento

Los instrumentos deberán almacenarse en un lugar seco, protegido del polvo y alejados de productos químicos. Evite las oscilaciones de temperatura y la radiación solar directa. Adopte medidas para protegerlos contra los daños que pudieran producirse durante el transporte, la limpieza, el mantenimiento y almacenamiento.

¡La manipulación incorrecta anula todos los derechos de garantía!

La observación de estas informaciones para el empleo, no permite eludir la responsabilidad de los propios actos. En este sentido, toda persona actúa a riesgo propio.

El autor de estas instrucciones de empleo no está sujeto a responsabilidad alguna.

Válido para productos de Clase I



Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG
Danningen 9
78579 Neuhausen ob Eck Germany

Tel. +49 77 77-939530
Fax +49 77 77-1300

www.kohler-medizintechnik.de
info@kohler-medizintechnik.de