

Importanti informazioni per l'utilizzatore! Leggere prima dell'uso dello strumento!



Avvertenze generali!

L'uso improprio e la manutenzione inadeguata degli strumenti nonché le eventuali modiche apportate agli stessi possono causare danni o guasti che possono provocare serie lesioni o addirittura la morte del paziente.

Alla consegna controllare lo strumento assicurandosi che non presenti danni da trasporto e che sia perfettamente funzionante.

Gli strumenti sono forniti non sterili; pertanto devono essere puliti e sterilizzati prima dell'uso da parte dell'utilizzatore, salvo che non siano contrassegnati con la dicitura "sterile".



Controllo di sicurezza

Trattare tutti gli strumenti con la dovuta cura. Prima dell'uso sottoporre ogni strumento ad un controllo visivo, assicurandosi che non presenti incrinature, fratture, deformazioni o impedimenti al movimento, soprattutto a livello delle lame, delle punte, degli innesti, dei blocchi, degli arresti e di tutte le parti mobili. Nel caso che lo strumento sia stato smontato controllare dopo il rimontaggio che sia perfettamente funzionante e che tutte le viti e i componenti siano serrati e ben saldi.



Pulizia, manutenzione e sterilizzazione

Pulire e disinfettare gli strumenti immediatamente dopo l'uso. Controllare soprattutto le lame, le punte, i blocchi e gli arresti. I prodotti componibili devono essere puliti sempre dopo averli smontati. Utilizzare solo detergenti specifici per strumenti chirurgici. Per la concentrazione ed il tempo di posa dei disinfettanti, seguire le indicazioni del produttore. Non superare le dosi consigliate per evitare di danneggiare gli strumenti.

Infine lavare gli strumenti con cura in acqua demineralizzata, lasciare sgocciolare ed asciugare.

Dopo ogni deterzione e prima della sterilizzazione trattare tutti gli strumenti con un olio specifico, innocuo dal punto di vista fisiologico.

Gli strumenti con giunti devono essere sterilizzati aperti. Per la sterilizzazione si consiglia di utilizzare l'autoclave o lo sterilizzatore ad aria calda. Seguire le istruzioni per l'uso del produttore.

Dopo la sterilizzazione lasciare raffreddare gli strumenti a temperatura ambiente; Evitare di immergerli in acqua fredda!



Manipolazione e stoccaggio

Stoccare gli strumenti in ambiente asciutto, al riparo dalla polvere, lontano da prodotti chimici. Non sottoporre gli strumenti a cambiamenti termici, né ai raggi diretti del sole. Proteggere gli strumenti per evitare danni durante il trasporto, la pulizia, la manutenzione e lo stoccaggio.

L'utilizzo improprio dello strumento comporta l'esclusione di ogni diritto di garanzia!

L'osservanza delle presenti istruzioni per l'uso non esonera l'utilizzatore dalla propria responsabilità. Ogni persona opera quindi a proprio rischio e pericolo.

E' esclusa la responsabilità dell'autore di queste istruzioni per l'uso.

Valido per i prodotti di classe I



Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG
Danningen 9
78579 Neuhausen ob Eck Germany

Tel. +49 77 77-939530
Fax +49 77 77-1300

www.kohler-medizintechnik.de
info@kohler-medizintechnik.de