

Viktig användarinformation!**Läs igenom denna information innan användning av instrumentet!****Principiella varningsanvisningar!**

En osakkunnig hantering eller skötsel av instrumentet samt en ej ändamålsenlig användning eller förändringar kan bidra till att instrumentet skadas eller att det inte längre fungerar. Detta kan i sin tur leda till allvarliga personskador hos patienten, och till och med innebära livsfara.

När du får instrumentet levererat ska du kontrollera det avseende eventuella transportskador och att det fungerar felfritt.

Instrumenten är osteriliserade när de levereras och måste rengöras och steriliseras innan användning. Undantagna är produkter som är märkta med texten "steril".

**Säkerhetskontroll**

Hantera alla instrument alltid mycket varsamt. Varje instrument ska kontrolleras visuellt innan användning. Kontrollera framför allt att det inte har sprickor, brott, krökningar och att det är lätthanterligt – särskilt när det gäller eggjar, spetsar, anslutningar, lås, spärrar och alla rörliga delar. Om instrumentet har plockats isär, måste du efter hopmonteringen se till att det fungerar felfritt och att alla skruvar och komponenter sitter fast.

**Rengöring, skötsel och sterilisering**

Direkt efter användning ska instrumentet rengöras och desinficeras noggrant. Var extra varsam när det gäller svåråtkomliga områden som eggjar, spetsar, anslutningar, lås och spärrar. Demonterbara produkter ska principiellt rengöras när de är isärplockade. Kirurgiska instrument får endast rengöras med för dessa tillåtna rengöringsmedel. Observera och följ framför allt tillverkarens anvisningar avseende desinfektionsmedlets koncentration och inverkningsstid. För att undvika skador på instrumentet ska du inte överskrida kraven i tillverkarens anvisningar. Spola till sist rent instrumentet noggrant med avmineraliserat vatten. Låt sedan instrumentet droppa av och torka färdigt.

Efter varje rengöring och före sterilisering ska samtliga instrument oljas in med lämplig och fysiologiskt riskfri olja.

Alla instrument med leder och länkar bör steriliseras i öppet tillstånd. För steriliseringen rekommenderar vi en autoklav eller en hetluftssterilisator. Vänligen följ alltid tillverkarens anvisningar.

Efter steriliseringen ska alla instrument -utan extra kylning-svalna av till rumstemperatur. Skölj inte med kallt vatten för att påskynda nedkylningen!

**Hantering och förvaring**

Instrumenten ska förvaras på en plats som är torr, dammfri och inte befinner sig i närhet av kemiska produkter. Undvik temperatursvängningar och direkt solstrålning. Vidtag åtgärder för att skydda instrumenten från skador vid transport, rengöring, skötsel och förvaring.

En felaktig hantering av instrumenten leder till bortfall av samtliga garantier!

Ingen kan fransäga sig eget ansvar även om denna användarinformation efterföljs. Varje användare handlar därför på egen risk.

Ett ansvar av upphovsrättsinnehavaren av denna bruksanvisning utesluts.

Gäller för produkter av klass I



Kohdent Roland Kohler
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bodenseeallee 14-16
78333 Stockach Germany
Tel. +49 7771 64999-0
Fax +49 7771 64999-50
info@kohler-medizintechnik.de
www.kohler-medizintechnik.de